



CYTOSTATIKA SPILD

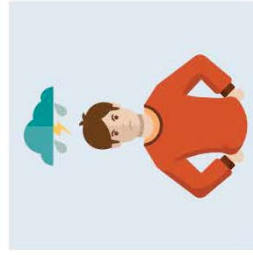

1) Bevar roen!

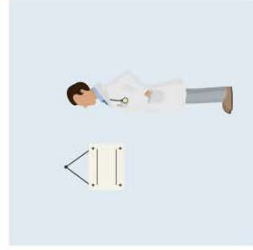


2) Følg instruktionerne




3) Afspær og marker området




4) Informer intern

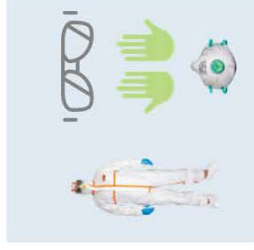


5) Iklæd dig værnemidlerne

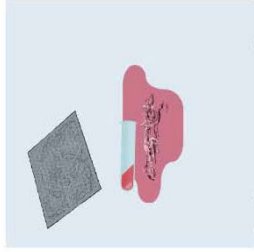

6) Observer type af spild (Væske eller pulver?)

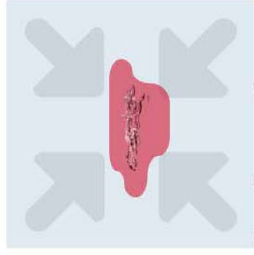

7) Rengør udefra mod midten

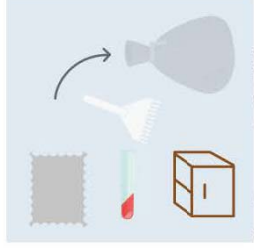


8) Forurenet affald i den klare affaldspose



9) Værnemidler i den "klinisk risikoaffald" mærkede sæk



10) Omhyggeligt brusebad

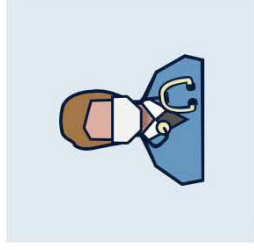

11) Gå til læge



Din Sikkerhed

Sikkerhedsudstyr A/S

CYTOSTATIKA SPILDKIT

- Beredskabskit til håndtering af
cytostatisk spild

Senest revideret: 26/06 - 2017

KONTAKT OS I DAG

Email: info@d-s.dk
Website: www.d-s.dk
Adresse: Menstrupvej 10, 4700 Næstved
RING TIL OS: 55 44 66 44

Instruktioner for rengøring:

Dit nødsituation D-S spildkit giver dig alt du har brug for til sikker håndtering og bortskaffelse af spildte cytostatiske kemikalier.

Flydende spild

1. Fold papkasse op til skarpe emner
2. Brug hvidt absorberent ark som fejekost og skub udefra og ind mod midt. Skub med hvid absorberent så meget af spildet og emballage/skarpe emner op på fejebakken som muligt. Fejebakke tømmes i papkasse. Papkasse lukkes og kommes i klar pose sammen med fejebakken.
3. Spred absorberende ark ud
Væskespild absorberes ved hjælp af de absorberende opsningsark: spred arkene ud over de spildte væsker. Arkene absorberer væske. Opsnugsarkene kommes i den klare pose og forsegles med strips.
4. Evt. supplerende rengøring - brug rigeligt vand og sæbe
5. Afklæd værnemidlerne systematisk som beskrevet på forrige side
6. Kom værnemidlerne i gul sæk mærket "klinisk risikoaffald" og forsegl sækken med strips.

Pulverformigt spild

1. Åben hættan på medfølgende vandflaske og lav en ring af vand om spildet, hæld rigeligt vand på pulverformigt spild og afvent af pulveret er vådt.
2. Brug hvidt absorberent ark som fejekost og skub udefra og ind mod midt. Skub med hvid absorberent så meget af spildet og emballage/skarpe emner op på fejebakken som muligt. Fejebakke tømmes i papkasse. Papkasse lukkes og kommes i klar pose sammen med fejebakken.
3. Spred absorberende ark ud over det spildte. Arkene absorberer spildet. Opsnugsarkene kommes i den klare pose og forsegles med strips.
4. Evt. supplerende rengøring - brug rigeligt vand og sæbe
5. Afklæd værnemidlerne systematisk som beskrevet på forrige side
6. Kom værnemidlerne i gul sæk mærket "klinisk risikoaffald" og forsegl sækken med strips.

1. **Bevar roen**
 - Undgå panik
 - Sørg for behandling af personer ramt af spild!
 - Aftag bekædningsgenstande der har været i berøring med cytostatika
 - Hav spildkit let tilgængeligt
2. **Følg instruktionerne!**
 - Følg instruktioner, der gælder for arbejdsstedet og materialet
3. **Afspær og marker stedet!**
 - Bloker adgangsveje og marker ulykkesstedet tydeligt
 - Luk vinduer og døre, stands person trafik, evt. afbryd ventilationen i lokalet for ikke at sprede spild
4. **Informér internt**
 - Informer internt omkring spildet for bedre at isolere området
5. **Ikklæd dig værnemidlerne og forbered rengøring**
 - Beskyt alle personer, der er involveret
 - Ikklæd maske, sikkerhedsbrille, beskyttelsesdragt, sikkeovertræk og 2 par handsker (mindste størrelse inderst, skal have 2 par på - Bemærk: Ikklæd først inderhandsker derefter dragt og sidst yderhandsker som skal gå udover dragtens ærme)
 - Bemærk: handskerne beskytter ikke imod ituslået glas
 - Åben de to medfølgende poser og fold kant 2-3 gange ned over sig selv.
6. **Observer type af spild**
 - Brug fremgangsmåde for rengøring for henholdsvis væskeformige eller pulverformigt spild.
7. **Rengøring**
 - Jævnfør instruktioner for henholdsvis flydende forurening/pulverformig forurening på næste side.
8. **Affald i den klare affaldspose**
 - Følg instruktioner for spildtype.
 - Opsugt spild og papæske kommes i den klare pose (posen som indeholdt spildkittet)
 - Forsegl den klare pose med strips og kom den i den gule affaldssæk mærket klinisk risikoaffald.
 - Alt andet der har været i berøring med spild kommes også i den gule affaldssæk mærket klinisk risikoaffald.
 - Gentag rengøring efter behov
 - Bemærk: alle artikler: må kun bruges én gang
9. **Værnemidler og klar pose med cytostatika spild i sæk mærket "Klinisk risikoaffald"**
 - Aftag systematisk beskyttelseshøj - put løbende afklædte værnemidler i sækken
 - Aftag yderste sæt handsker, ved at tage fat i manchetter ved at trække handsken udover sig selv - så handsken vendes på vrangen
 - Lyn dragt ned - tag fat på inderside af dragt - afklæd dragt - vend dragten på vrangen
 - Aftag støvleovertræk - aftag sidste sæt handsker - aftag forsigtigt maske og briller uden at røre yderside
 - Put brugte værnemidler i sæk mærket "Klinisk risikoaffald" - Forsegl sækken med strips
10. **Omhyggeligt brusebad**
 - Alle personer involveret skal rengøre sig selv omhyggeligt
11. **Kontakt læge**
 - Ved ubehag eller der har været direkte kontakt med forurening - kontakt læge

1. Læs brugerinformationen omhyggeligt og hold den nær arbejdsstationen. Alt personale skal undervises om, hvordan man bruger spildkittet mindst en gang om året. Hvis du ignorerer brugeroplysningerne, kan beskyttelsen ikke garanteres og forkert anvendelse af spildkittets indhold kan være skadeligt for brugerens og miljøets helbred.

2. Generel information

2.1 Leverandør

D-S Sikkerhedsudstyr A/S

2.2 CE-Mærkning

Alle produkter og indhold af spildkittet er CE-mærket og godkendt. Hver enkelt produkt har deres egne EU-godkendelser. Dermed består spildkittet af produkter godkendt i henhold til bl.a.: EN 420:2003, EN 374:2003, ISO 5/ klasse 100, EN1149-1: Ω 2,94 x 10¹², EN1149-2: Ω 3,3 x 10⁹, EN 14605:2005+A1 Type 4B, EN ISO 13982-1:2005+A1 Type 5B, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6B, EN 1149-5:2008, EN 14126:2004, EN 1149-5:2008, EN 149:2001 + A1:2009, EN 166 F, EN 166 1F.

2.3 ESOP

D-S Spildkit indeholder alle komponenter listet i indholdslisten (se side 1) og opfylder derfor European Society of Oncology Pharmacy (ESOP) anbefalinger for et spild kit.

2.4 Ophavsret og industriel ejendomsret

Denne brugerinformation er D-S Sikkerhedsudstyr A/S ejendom og må ikke videregives til tredjepart, kopieres eller anvendes til salgsfremmende formål, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke. Overtrædelse af industrielle ejendomsrettigheder vil blive retsforfulgt. D-S Sikkerhedsudstyr A/S påtager sig intet ansvar: for spild kittets beskyttelse, for spildkittets komponenter, som er anvendt uden for anvendelsesområdet. Indholdet kan ændres til enhver tid og uden varsel. Med forbehold for tekniske og produktionsrelaterede ændringer. Ophavsret D-S Sikkerhedsudstyr A/S.

3. Beskrivelse

Spildkittet er typetestet og certificeret for sikker bortskaffelse af små mængder spildte CMR-lægemidler (f.eks. Cytostatika). D-S Spildkit indeholder et komplet sæt personlige værnemidler, et advarselsskilt, rengøringsredskaber til tør og væskeformig forurening samt brudt glas, samt affaldshåndtering redskaber.

3.1 Anvendelse

Spildkittet må kun bruges én gang til at bortskaffe cytostatiske lægemidler. Genbrug ikke redskaber heller!

3.2 Bortskaffelse

Efter brug skal alle D-S Spildkit-komponenter behandles som affald, der kræver særlig overvågning (affaldskode 18 01 08 i overensstemmelse med 2000/532/EC [8]). Brug de medfølgende bortskaffelses redskaber. Kun godkendte special affaldshåndterings virksomheder kan indsamle, transportere og bortskaffe brugte kits.

Indholdsliste pr. pose

Antal	Produkt	Vare Nr.:	Check
2 stk	Padex 100 absorbenter i ark	25-O-1207	
1 stk	Hvid Padex 100 absorberende ark	25-O-50	
1 stk	Papirsæk 700/250x950 mm 2lag PE gul klinisk risikoaffald	21-V-6617	
2 stk	Elektriker strips	...	
2 par	Derma Shield beskyttelseshandsker (str. L)	12-73-701	
1 stk	Beskyttelsesdragt PRO+4 lamineret coverall med hætte, type 4, 5 og 6 (str. XL)	33-C-2597-XL	
1 par	Støvleovertræk i polypropylen, antistatisk	33-N-360	
1 stk	Zero 31, P3 filtermaske	28-BL-ZERO-31	
1 stk	Sikkerhedsbrille (kan bæres med egen brille)	32-PF-8150	
1 stk	Vand i flaske	...	
1 stk	Fejebakke, polypropylen	21-V-5580	
2 stk	Vinkelskilte	...	
1 stk	Foldbar papæske til skarpe emner	...	
1 stk	Klar pose	...	
1 stk	Dokumentation og instruktioner	...	

3.3 Opbevaring og transport

Opbevar cyostatika kittet mørkt (væk fra direkte UV-lys og sollys); Køligt (+5 til + 40 ° C), tørt; Ingen kontakt med spidse og / eller skarpe genstande. Opbevares ikke i nærheden af udstyr eller installationer der kan producere ozon (fx gennem kviksveldampe, højspændingsudstyr osv.); Undgå direkte kontakt med metaller, fx kobber, mangan, magnesium og jern; Undgå kontakt med oliebaseerede antiseptiske phenoler og deres derivater, fedtstoffer, petrolatum, petroleum, paraffin eller andre lignende forbindelser.

4 Instruktions til brug

EN-direktiv 2000/54 / EN [9] og de relevante nationale bestemmelser specificerer den adfærd, der er nødvendig i situationer, hvor medarbejderne udsættes for usædvanligt høje koncentrationer af farlige kræftfremkaldende stoffer. Der skal træffes passende forholdsregler i denne henseende. Arbejdsgiverne har pligt og ansvar for at der udarbejdes en risikoanalyse, udarbejde en brugervejledning og træne alle relevante medarbejdere mindst én gang om året. Dette skal registreres på skrift. Hav et D-S Spildkit klar og vedhæft korte anvisninger til brug. Før du bruger kittet, skal du analysere potentielt farlige situationer, fx under transport, levering, opbevaring, produktion, anvendelse, rengøring og bortskaffelse mv. af cyostatika.

Cytostatika gennembrudstider

	Kemikalie	DermaShield® 73-701 (Neoprene)
15 min	Carmustine	4
	Cisplatin	6
	Cyclophosphamide	6
	Cytarabine	6
	Docetaxel	6
	Doxorubicin	6
	Etoposide	6
	5-Fluorouracil	6
	Ifosfamide	6
	Irinotecan	4
	Methotrexate	6
	Mitomycin C	6
	Oxaliplatin	6
	Paclitaxel	6
	Thiotepa	6
	Vinorelbine	4
	Ganciclovir	6

	Kemikalie	DermaShield® 73-701 (Neoprene)
30 min	Carmustine	3
	Cisplatin	6
	Cyclophosphamide	5
	Cytarabine	4
	Docetaxel	5
	Doxorubicin	6
	Etoposide	6
	5-Fluorouracil	6
	Ifosfamide	4
	Irinotecan	4
	Methotrexate	5
	Mitomycin C	4
	Oxaliplatin	6
	Paclitaxel	4
	Thiotepa	5
	Vinorelbine	4
	Ganciclovir	5

	Kemikalie	DermaShield® 73-701 (Neoprene)
60 min	Carmustine	3
	Cisplatin	6
	Cyclophosphamide	5
	Cytarabine	4
	Docetaxel	5
	Doxorubicin	6
	Etoposide	4
	5-Fluorouracil	6
	Ifosfamide	4
	Irinotecan	4
	Methotrexate	5
	Mitomycin C	4
	Oxaliplatin	4
	Paclitaxel	4
	Thiotepa	5
	Vinorelbine	4
	Ganciclovir	4

Niveau 1: Gennembrud målt til: 10 gange under EN374-3 grænsekrav.

Niveau 2: Gennembrud målt til: 10 til 100 gange under EN374-3 grænsekrav.

Niveau 3: Gennembrud målt til: 100 til 1.000 gange under EN374-3 grænsekrav.

Niveau 4: Gennembrud målt til: 1.000 til 10.000 gange under EN374-3 grænsekrav.

Niveau 5: Gennembrud målt til: 10.000 til 100.000 gange under EN374-3 grænsekrav.

Niveau 6:> Gennembrud målt til: mindst 100.000 gange under EN374-3 grænsekrav eller ingen gennembrud målt.

Indikator gennembrængning temperatur: 25°C 37°C 43°C